

老眼鏡スタンドセット(抗菌)

取扱説明書

【セット内容とご使用方法】

スタンド 大1台、小1台 計2台
老眼鏡(抗菌) 各度数1本 計3本
シール「ご自由にお使いください」2枚

度数によってシールの色を変えてあります。
スタンドと老眼鏡の色シール表示にあわせて入れてください。

【本商品に関する表示】

○機械器具 71
○一般医療機器 JMDAコード
○一般的名称
○販売名
製造販売届出番号
生産国

視力補正用眼鏡
35065000
眼鏡
老眼鏡F10
18B3X00032100010
中国

【警告】 取扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

- この商品は視力補正用の眼鏡です。見づらくなった手元の文字などを見やすくすることを目的に作られています。
運転時や歩行時は必ず外してください。
- 階段の昇り降り、段差のあるところでの使用は避けてください。
- 慣れない内は頭痛やめまい・歪みを感じる場合があります。そのような場合は必ず購入店等にご相談ください。
- 老眼鏡を通して日光や強い光を見ないでください。失明のおそれがあります。
もし、誤って強い光をあてて皮膚や目に異常を感じた時は、ただちに専門医にご相談ください。
- 老眼鏡は日光のあたる場所に保管したり放置しないでください。反射光、ふく射光も避けてください。
火災の原因となる恐れがあります。

【注意】 取扱いを誤ると軽傷を負うかまたは物的損害が発生する可能性があります。

- お子様の手の届くところに保管、設置しないでください。
- 老眼鏡のフレームが何らかの理由で変形した場合、無理な取扱いで結合部分が破損した場合など使用を中止してください。
- レンズは傷つきやすいので、お手入れや取扱い時には十分ご注意ください。

【仕様】

老眼鏡 (抗菌)	型番	フレームカラー	度数	素材	レンズ/フレーム
	FR-08	ブラック	+1.5 弱	アクリル(単焦点クリアーレンズ)/プラスチック	
FR-08	+2.0 中				
FR-08	+2.5 強				

スタンド	素材
	ABS


【お手入れのしかた】

- 日常のお手入れは水(冷水)洗い後、やわらかい布でから拭きしてください。


【スタンドのご使用イメージ】



通常イメージ
長さ=210mm

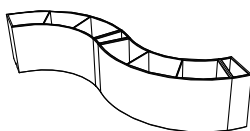

2個連結イメージ
長さ=385mm

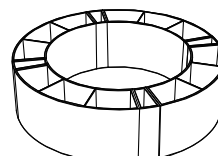

円状連結イメージ
長さ=φ297mm

【製造販売元】

藤田光学株式会社
〒916-0016 福井県鯖江市神中町1-5-22
<https://www.fujikon-hd.com>

【発売元】

カール事務器株式会社
〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9
<https://www.carl.co.jp>

カール事務器
お客様相談室
【受付時間】 9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)

03-3695-5379